

Instrucciones para recoger muestra

****No comer/beber dentro de los 30 minutos antes de recolectar la muestra****

1. Retire el tapón naranja del frasco y coloque el embudo en la parte superior.
2. Babe hasta que el frasco esté $\frac{3}{4}$ lleno (hasta la parte superior del código de barras)
 - a. La saliva debe ser clara, sin burbujas. Algunas burbujas pueden pasar la marca de $\frac{3}{4}$.
 - b. Asegúrese de que la muestra contiene saliva, sin mucosidad.
 - c. Levantar ligeramente el embudo según sea necesario para que la saliva se asiente.
 - d. Utilizar un palillo si es necesario para reventar las burbujas y asentar la saliva.
3. Una vez que el frasco este $\frac{3}{4}$ lleno, apriete suavemente el tapón naranja para cerrar.
4. ANTES DE DEJAR LA MUESTRA, escanee el código QR o visite coronavirus.utah.edu/selftest para completar el registro. Siga las instrucciones para la entrega.
5. Vuelva a poner el frasco en la bolsa. Bote el embudo y el palillo.



REGISTRO,
INFORMACIÓN
ADICIONAL



Si tiene alguna pregunta o duda, envíe un correo electrónico a: CampusCovidTesting@utah.edu